

TOOLS TO KEEP SMILING

FKG

FKG Endo Stands

Der einfache Weg!

Easy RaCe

Easy RaCe Set um rund 80% aller Wurzelkanäle aufbereiten.

Xtreme RaCe

Xtreme RaCe Set für schwierige Kanäle mit koronaler/starker apikaler Krümmung sowie kalzifizierter Kanäle.

Free Style RaCe

Bewegungsfreiheit für NiTi RaCe instrumente, die ideale Ergänzung zu den Easy oder Xtreme RaCe.



- 5 NiTi RaCe Instrumente mit Antiverschraubungsdesign
- 2 optimierte Sequenzen, Crow-Down oder Single Length in einem Instrumentensatz



- 5 NiTi RaCe Instrumente mit Antiverschraubungsdesign
- 1 optimierte Sequenz, Step-Down



- Neu -

- 14 freie Stellen um die NiTi RaCe Instrumente nach Ihren persönlichen Vorlieben zu setzen

FKG Easy & Xtreme RaCe Endo Stands sind abgestimmt auf den Gebrauch der rotierenden NiTi Instrumente FKG Pre-RaCe & RaCe.


FKG DENTAIRE
Swiss Dental Products



FKG REF. 99.096.10.01C.DE

Easy RaCe




Für einfache und mittelschwere Kanäle

Zugangskavität präparieren • Kanäleingänge lokalisieren

1. Führen Sie eine Handfeile ISO 10 in den Kanal ein, bis zur einer Tiefe von etwa der 1/2 Länge des Kanals, die als Wegweiser für RaCe dient;
2. Präparieren Sie den koronalen und mittleren Abschnitt des Kanals mit Pre-RaCe 40/.10, gefolgt von Pre-RaCe 35/.08;
3. Messen Sie die Arbeitslänge mit einem Apexfinder/Röntgenbild;
4. Die Erweiterung des restlichen Kanals erfolgt mit RaCe 25/.06 bis Sie einen Widerstand spüren oder die AL erreicht ist. Sobald Sie Widerstand spüren, wechseln Sie zu 25/.04 bis zur AL - von Fall zu Fall verwenden Sie anschließend 25/.02. Bei Frontzähnen kann 25/.06 nochmals vorsichtig bis zur AL eingeführt werden.

Easy RaCe optimierte Sequenzen

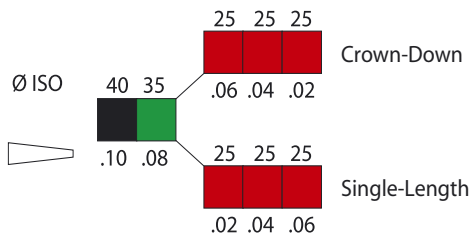

Xtreme RaCe




Für schwierige Kanäle

Erweitern Sie den Kanaleingang genauso wie für Easy RaCe. Ein guter Zugang ist hier noch wichtiger, weil eine erfolgreiche Aufbereitung des Kanals davon abhängt.

1. Verwenden Sie Pre-RaCe 40/.10, dann 35/.08 im koronalen Drittel;
2. Überprüfen Sie die AL mit Handfeile ISO 10 oder 15 und merken Sie sich die Krümmungsrichtung;
3. Die Erweiterung des restlichen Kanals erfolgt mit der Step-Down-Sequenz 2% Konizität bis zur AL. RaCe 15/.02 > 20/.02 > 25/.02;
4. Je nach Bedarf Behandlung abschließen, passend zur Anatomie des Kanals.

Xtreme RaCe optimierte Sequenz

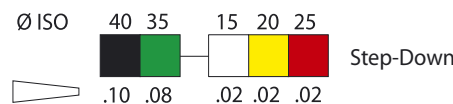

Free style RaCe



Für Ihre eigene Sequenzen

Die neuen FKG Race Sequenzen sind hinsichtlich der Behandlungsmethoden optimal aufeinander abgestimmt. Die Instrumente können von Fall zu Fall um weitere Größen ergänzt werden.

Vereinfachen Sie Ihre Endo mit die FKG Endo Stands

Von nun an ist der Anwender der Meister seiner Instrumente

Die FKG Endo Stands zeichnen sich durch ihre besondere Anwenderfreundlichkeit aus. Sie sind kompakt dimensioniert, stabil gebaut, gewähren eine klare Übersicht und lassen sich sterilisieren.

Drehzahl-Einstellung-Tabelle

Taper	Torque Ncm	Ø ISO												
		15	20	25	30	35	40	45	50	55	60			
PRE-RaCe	.10						1.5							
	.08					1.5								
	.06			1			1							
RaCe	.06			1										
	.04		0.5		0.7			1						
	.02		0.5		0.7				1					

Rotierende NiTi Instrumente FKG RaCe

Lieferformen der Sequenzen:

- Easy RaCe - 722.S40 - 5x NiTi - 40.10/35.08/25.06/25.04/25.02
- Easy RaCe - 723.S40 - 2x rost. Stahl: 40.10/35.08 & 3x NiTi: 25.06/25.04/25.02
- Xtreme RaCe - 727.S40 - 5x NiTi - 40.10/35.08/15.02/20.02/25.02
- Xtreme RaCe - 728.S40 - 2x rost. Stahl: 40.10/35.08 & 3x NiTi: 15.02/20.02/25.02



FKG RaCe ist erhältlich in:

- Satz à 5 Instrumente, Einzelgrößen
- Länge/aktiver Teil: 19/9 & 21 + 25/16 mm (31/16 mm auf Anfrage)
- Griffe: CM 12 mm, GM 15 mm, CA (Manuell)

Taper SMD	Ø ISO	Ø ISO												
		15	20	25	30	35	40	45	50	55	60			
PRE-RaCe & SMD	.10						•							
	.08					•								
	.06			•			•							
RaCe & SMD	.06	•	•	•	•	•								
	.04	•	•	•	•	•		•						
	.02	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Anm. - Pre-RaCe 40 und 35 gibt es in NiTi und auch aus Stahl.



Bestellungen & Fragen?

- Ihr FKG Partner (siehe unten Adresse - Stempel)
- FKG Dentaire, PF 4094, CH-2304 La Chaux-de-Fonds, Switzerland
- www.fkg.ch • info@fkg.ch • T. +41.32.924.22.44 • F. +41.32.924.22.55 •

