

TOOLS TO KEEP SMILING

FKG

FKG Sensipast

*Der Pastenstopfer mit automatischer Auskupplung!
Wirksam, sicher und sparsam!*

Feinführend und intelligent!

Sensipast kennt seine Grenzen und überschreitet sie nie!

Wenn die Spirale verklemmt, kuppelt **Sensipast** automatisch **aus**: Der Bruch der Spirale und die überdurchschnittliche Ermüdung des Metalls werden vermieden.

Auf diese Weise arbeiten Sie **ohne Stress** tiefer im Kanal, um eine **bessere Füllung** zu erreichen.

... integrierte Kupplung!



SENSIPAST

FKG
FKG DENTAIRE
Swiss Dental Products



FKG REF. - 99.180.10.01A.DE

Feinführend und intelligent! Der *Sensipast* ist der erste Pastenstopfer mit automatischer Auskuppung!

Wenn der aktive Teil des Pastenstopfers blockiert ist, reagiert das Auskuppeln des *Sensipast* bevor es zum Bruch kommen kann, indem die Spirale vom Antriebssystem abgekuppelt wird.

Die Miniatur-Reibungskupplung befindet sich im Inneren des Griffes. Der *Sensipast* kann daher mit jedem Winkelstück verwendet werden.

Auf diese Weise können Sie ohne Stress arbeiten, um eine effiziente Füllung zu erzielen!

Technische Daten:

Der Pastenstopfer ist in der Tat ein empfindliches Instrument. Die Drehbewegung des Drahtes wird mit einem Handstück angetrieben, dessen Leistung in keinem Verhältnis steht mit der geringen Belastbarkeit des spiralförmigen Drahtes. Ein Verkleben der Spirale provoziert oft den sofortigen Bruch eines herkömmlichen Pastenstopfers. In diesen Fällen reagiert das Auskuppeln des *Sensipast* bevor es zum Bruch kommen kann.

Die herkömmlichen Pastenstopfer sind auch den mehr oder weniger starken Bremserscheinungen ausgesetzt, die bei gekrümmten Wurzelkanälen, Biegungen in der Nähe des Griffes und beim Hin-

und Herbewegen des Wurzelfüllers vorkommen. Diese Bremsungen erwirken eine überdurchschnittliche Ermüdung des Drahtes.

In allen diesen Fällen reagiert der *Sensipast* durch Auskuppung bevor die Belastung die Elastizitätsgrenze überschreitet.


Der *Sensipast* eignet sich ausserdem wegen seiner grossen Anwendungssicherheit vorzüglich für Alltagsfüllung.

Aber Achtung, das *Sensipast* System kann die normale Ermüdung des Pastenstopfers nicht vermeiden. Also wechseln Sie Ihren *Sensipast* von Zeit zu Zeit.

Der feinführende Pastenstopfer

Der *Sensipast* kennt seine Grenzen und überschreitet sie nie.


Bremungen im apikalen Bereich...

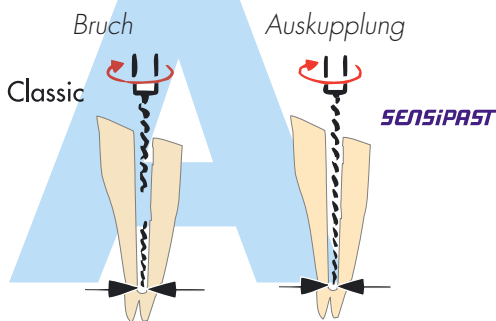

Der sichere Pastenstopfer

Die Spirale des *Sensipast* löst sich und stoppt in dem Moment, in dem ein herkömmlicher Pastenstopfer bricht.

Gekrümmte Kanäle...

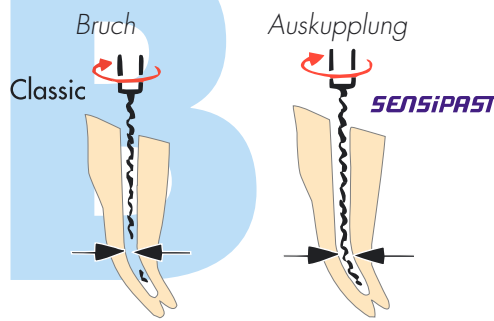

Verfügbarkeit - Ø ISO Grössen

25 30 35 40



- Satz 4 Stk.
- Sortiment 4 Stk. ISO 25-40

aktiver Teil der Länge

L - mm
21 - 25 - 29



Griff




GM 15 mm

Der wirkungsvolle Pastenstopfer

Der *Sensipast* kann tiefer in den Kanal eingeführt werden, ohne Bruchrisiko im apikalen Bereich. Bessere Qualität der Füllung.


Bremungen durch Hin-/Herbewegung...

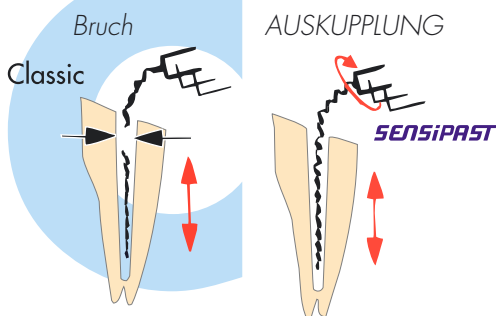

Der wirtschaftliche Pastenstopfer

Die Langlebigkeit des *Sensipast* übertrifft bei weitem jene aller anderen Pastenstopfer. Es handelt sich um ein sehr wirtschaftliches Instrument.

Anormale Ermüdung...

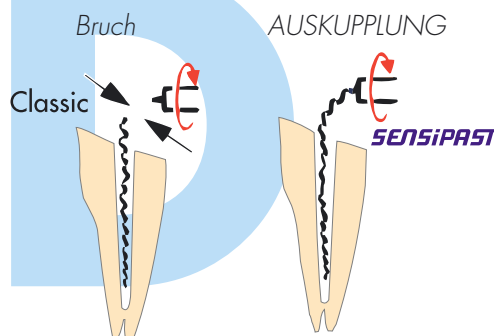

Sie werden den *Sensipast* an seiner besonderen «Nase» erkennen, deren Farbe die Instrumentengrösse gemäss ISO-Norm bezeichnet.



SENSIPAST