

LES OUTILS DU SOURIRE

FKG

FKG Sensipast

*Bouffe-pâte à débrayage automatique!
Efficace, sûr et économique!*

Sensible et intelligent!

Sensipast connaît les limites à ne pas dépasser!

Lorsque sa partie active se bloque, le débrayage automatique joue son rôle: éviter la rupture des spires et empêcher une fatigue excessive du métal.

Vous pouvez travailler sans stress, plus en profondeur, pour une obturation optimale!

...Débrayage à bord



SENSIPAST

FKG
FKG DENTAIRE
Swiss Dental Products



FKG REF. - 99.180.10.01A.FR

Sensible et intelligent, *Sensipast* est le seul bourre-pâte à débrayage automatique de sécurité, qui connait ses capacités et ne les dépasse jamais!

Quand sa partie active est bloquée dans un canal fortement incurvé, le débrayage automatique réagit: évitant la rupture de la spirale et une fatigue anormale.

L'embrayage miniature est logé dans le mandrin même du *Sensipast*, cette conception unique vous permet de l'utiliser avec n'importe quel contre-angle du marché.

Vous pouvez travailler sans stress, plus en profondeur, pour une obturation optimale!

Notes techniques:

Le bourre-pâte est un instrument délicat. Sa partie active est constituée d'un fil d'acier de quelques centièmes de millimètre seulement. Il est entraîné en rotation par un appareillage dont la puissance est sans aucune mesure avec la résistance du fil qui forme les spires.

Un bourre-pâte classique subit des freinages plus ou moins importants, notamment dans des canaux très courbés, des flexions excessives près du mandrin et provoque souvent sa rupture immédiate. Dans ce cas, le débrayage du *Sensipast* agit avant la rupture des spires, en les relâchant du système d'entraînement.

Dans tous ces cas le *Sensipast* réagit avant

que les contraintes ne dépassent les limites d'élasticité du métal.


Le *Sensipast* est employé avantagement pour l'obturation quotidienne aux vues de sa haute sécurité d'emploi et durée de vie.

Mais attention, le système *Sensipast* ne peut rien contre la fatigue normale d'un bourre-pâte. Alors, changez votre instrument de temps à autre

Le bourre-pâte avec sensibilité

Sensipast connaît ses capacités et ne les dépasse jamais.


Blocage en zone apicale...

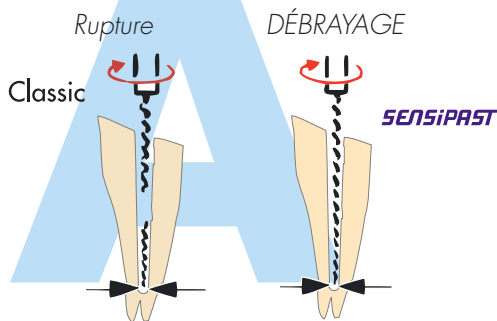

Le bourre-pâte sûr

Les spires du *Sensipast* s'arrêtent au moment où celles des bourres-pâtes classiques se rompent.

Canal courbé...

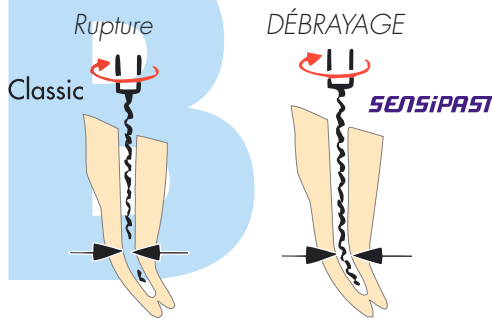

Disponibilité - Ø tailles ISO


25 30 35 40



- Par jeux de 4 pièces
- Assortiment standard 4 pièces ISO 25-40

Partie active

L - mm
21 - 25 - 29

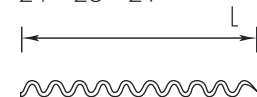


Manche



Le bourre-pâte efficace

Sensipast peut-être conduit plus profondément dans le canal, sans crainte d'une rupture en zone apicale. La qualité de l'obturation en est améliorée.


Freinage lors de va-et-vient...

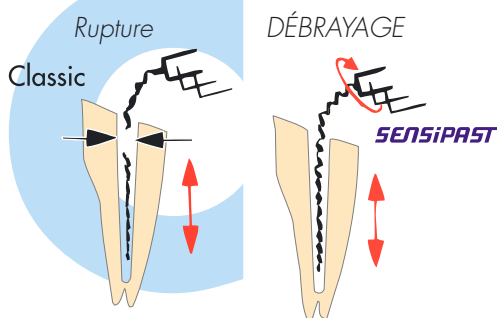

Le bourre-pâte économique

La longévité du *Sensipast*, supérieure à celle de n'importe quel bourre-pâte, en fait un instrument particulièrement économique.

Fatigue anormale...

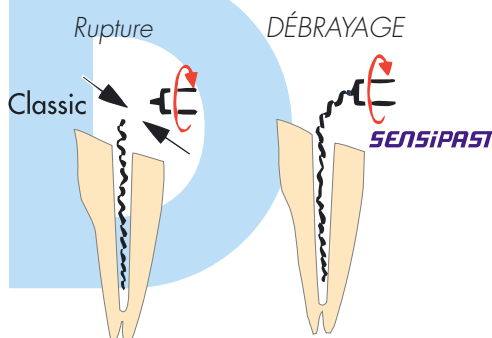

Vous reconnaîtrez le *Sensipast* à son «nez» particulier. La couleur de celui-ci vous indiquera la dimension de l'instrument conformément au code ISO.



SENSIPAST