




# Finisher

Up to  
98%  
bacterial reduction.\*  
The universal mechanical  
cleaning solution.

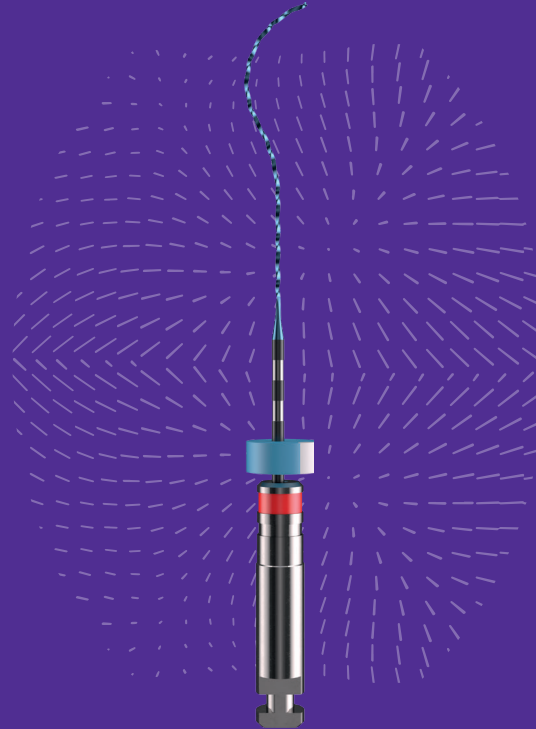


[www.fkg.ch/finisher](http://www.fkg.ch/finisher)

Enhanced cleaning

# Finisher



## Universally Compatible

Finisher is compatible with all rotary or reciprocating endo systems.

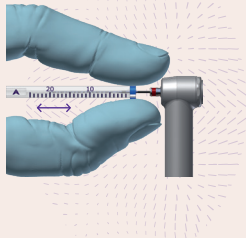

Finisher  
25/.00

800-1000RPM – 1Ncm

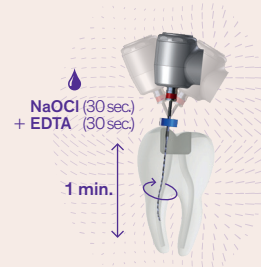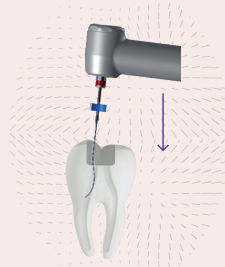

### EN

- Shaping min.  $\varnothing$  25.
- Set the working length by using the plastic tube.

### FR

- Mise en forme min.  $\varnothing$  25.
- Reporter la longueur de travail à l'aide du tube en plastique.

### DE

- Aufbereitung min.  $\varnothing$  25.
- Die Arbeitslänge mit Hilfe des Kunststoffröhrchens einstellen.

- Start with the largest canal.
- Insert the instrument pointing towards the cusp and start the motor.

- Débuter par le canal le plus large.
- Insérer l'instrument en l'orientant contre la cuspidé et démarrer le moteur.

- Mit dem weitesten Kanalen.
- Das Instrument Richtung Höcker einführen und den Motor starten.

- Clean the entire canal for 1 minute with long and gentle strokes (7-8 mm).
- Proceed to final rinse.

- Nettoyer l'intégralité du canal pendant 1 minute à l'aide de longs et doux va-et-vient (7-8 mm).
- Procéder au rinçage final.

- Den Kanal für 1 Minute mit langen und sanften Bewegungen (7-8mm) reinigen.
- Abschlusspülung durchführen.

## Cleaning achieved

