



R-Motion® Glider




R-Motion® 30




Reziproke Bewegung (gegen den Uhrzeigersinn)



- Einen geradlinigen koronalen und radikulären Zugang präparieren
- Den Kanal mit einer Handfeile ISO 010 sondieren
- Bestimmen Sie die Arbeitslänge (AL)

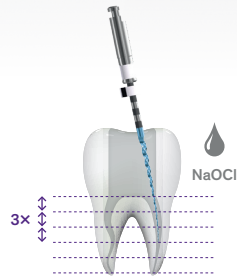

- Verwenden Sie den **R-Motion Glider** mit **sanften Bewegungen von 2-3 mm** (max. 3) und bereiten Sie bis zur AL auf
- Spülen und rekapitulieren

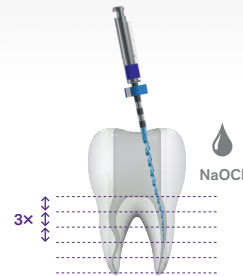

- Verwenden Sie **die entsprechende R-Motion Aufbereitungsfeile** mit **sanften Bewegungen von 2-3 mm** (max. 3) ausführen, mit sehr wenig Druck nach apical und die Feile passiv in den Kanal bis zur AL eindringen lassen
- Spülen und rekapitulieren



- Wenn die Aufbereitung des Kanals abgeschlossen ist fahren Sie mit der Reinigung des Kanals fort
- Mit entsprechenden GP Spitzen und Sealer füllen

R-Motion®



INFO

Präoperative
Röntgenauf-
nahmen



Zugangsvor-
bereitung



Bestimmen Sie
die Arbeitslänge
(AL)

GLEITPFAD

R-Motion
Glider



15/03v

R-Motion
Glider C



15/03v

bis AL

Die Verwendung des R-Motion
Glider C wird für Kanäle
empfohlen, die eine erhöhte
Steifigkeit des Instruments
erfordern und/oder wenn der
R-Motion Glider nicht weiter
vordringt und die Arbeitslänge
nicht erreicht werden kann.

WÄHLEN SIE DIE AUFBEREITUNG FEILE*

Enge
Kanal

R-Motion
20



20/04

bis AL

Standard
Kanal

R-Motion
30



30/04

bis AL

Für die
meisten Fälle

Mittlerer
Kanal

R-Motion
40



40/04

bis AL

Großer
Kanal

R-Motion
50



50/04

bis AL

Reinigen &
Füllen

* Wählen Sie das entsprechende R-Motion Aufbereitungsinstrument, welches der Anatomie des zu behandelnden Kanals am besten entspricht. Wenn die Anatomie des Kanals anhand der Röntgenaufnahmen nicht eindeutig bestimmt werden kann, ist es möglich mittels Handfeilen eine weitere Verifizierung des Kanals durchzuführen.

FKG
swiss endo

