


R-Motion®

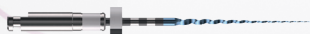

R-Motion® Glider



R-Motion® 30




Movimento alternato (antiorario)




FKG
swiss endo



- Creare un accesso coronale e radicolare diretto
- Utilizzare una lima manuale ISO 010 per esplorare il canale
- Determinare la lunghezza di lavoro (LL)

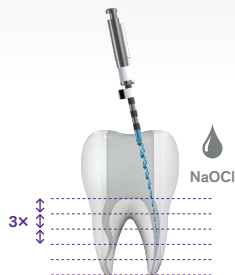

- Avanzare con **R-Motion Glider** fino alla LL tramite **leggeri movimenti di 2-3 mm** (max. 3)
- Irrigare e ricapitolare

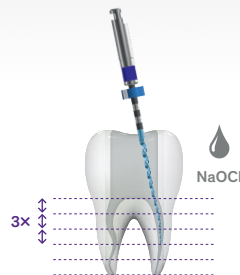

- Utilizzare la **lima di sagomatura R-Motion appropriata** con **leggeri movimenti di 2-3 mm** (max. 3), esercitando una pressione apicale molto lieve, consentendo alla lima di avanzare passivamente lungo il canale fino a raggiungere la LL
- Irrigare e ricapitolare



- Al termine della sagomatura del canale, pulirlo
- Otturare selezionando la punta GP e il cemento appropriati

R-Motion®



INFO

Radiografie
preoperatorie



Preparazione di
accesso



Determinare
la lunghezza di
lavoro (LL)



PERCORSO DI SCORRIMENTO

R-Motion
Glider



15/03v

R-Motion
Glider C



15/03v

fino alla LL

*L'utilizzo dell'R-Motion Glider C è
raccomandato per i canali
che richiedono una maggiore
rigidità dello strumento e/o se
l'R-Motion Glider non avanza più e
non riesce a raggiungere
la lunghezza di lavoro*



SELEZIONE DEL FILE PER LA SAGOMATURA*

Canale
stretto

R-Motion
20



20/04

fino alla LL

Canale
standard

R-Motion
30



30/04

fino alla LL

Canale
medio

R-Motion
40



40/04

fino alla LL

Canale
ampio

R-Motion
50



50/04

fino alla LL

*La maggior
parte dei casi*



Pulire &
Otturare



FKG
swiss endo

* Selezionare lo strumento unico di sagomatura R-Motion più adatto all'anatomia del canale trattato. Se le radiografie non consentono di identificare chiaramente l'anatomia del canale, questa può essere misurata con lime manuali.

