


R-Motion®



R-Motion® Glider

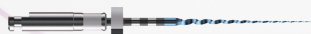

R-Motion® 30

Canal estándar OPÇÃO ISO 030




Movimento recíproco (sentido contrário aos ponteiros do relógio)




FKG
swiss endo



- Criar acesso radicular e coronal direto
- Usar uma lima manual ISO 010 para explorar o canal
- Determinar o comprimento de trabalho (CT)

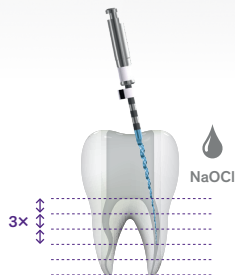

- Progredir com o **R-Motion Glider** até ao CT com **movimentos suaves de 2-3 mm** (máx. 3)
- Irrigar e repetir

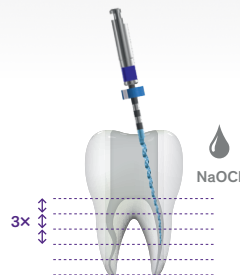

- Usar a **lima de preparo R-Motion apropriada** com **movimentos suaves de 2-3 mm** (máx. 3), usando uma pressão apical bastante leve e permitindo que a lima progrida passivamente ao longo do canal até alcançar o CT
- Irrigar e repetir



- Depois de o canal ser instrumentado, continuar com a limpeza do canal
- Obturar selecionando a ponta de GP e sealer apropriados

R-Motion®



INFO

Radiografias
pré-operatórias



Preparação do
acesso



Determinação do
comprimento de
trabalho (CT)



GLIDE PATH

R-Motion
Glider



15/03v

R-Motion
Glider C



15/03v

até CT

A utilização do R-Motion Glider C é recomendada para os canais que necessitem de uma rigidez acrescida do instrumento e/ou se o R-Motion Glider deixar de avançar e não atingir o comprimento de trabalho.

SELEÇÃO DE LIMA DE PREPARO*

Canal
estreito

R-Motion
20



20/04

até CT

Canal
estándar

R-Motion
30



30/04

até CT

Maioria dos casos

Canal
médio

R-Motion
40



40/04

até CT

Canal
largo

R-Motion
50



50/04

até CT



Limpar e
Obturar

* Selecionar o instrumento de preparo de lima única R-Motion que se adequa melhor à anatomia do canal a tratar. Se as radiografias não permitirem a identificação clara da anatomia do canal, pode ser aferida usando limas manuais.

