



FKG  
swiss endo



Rotierende NiTi-  
Instrumente zur  
maschinellen  
Aufbereitung des  
Gleitpfades

## ScoutRace

Sequenz speziell für Kanäle mit extremer Krümmung



## ► Das Programm FKG Race

Race (« Reamer with Alternating Cutting Edges ») ist das vollständigste Programm von rotierenden NiTi Instrumenten zur Wurzelkanalaufbereitung.

### ScoutRace

Sequenz speziell für extreme Krümmungen

ScoutRace ist eine Sequenz von drei Instrumenten mit einer Konizität von .02 und den ISO Durchmessern 10, 15 und 20. Diese Instrumente sind hervorragend zur maschinellen Aufbereitung des Gleitpfades in extremen oder « S »-förmigen Krümmungen geeignet. Sie werden mit 600-800 Upm nach Feststellung der Arbeitslänge (AL) verwendet. Die ScoutRace erlauben eine schnellere und sicherere Aufbereitung des

Gleitpfades als mit manuellen Instrumenten. Die Anatomie im mittleren und apikalen Drittel wird sehr gut respektiert, ohne Kanalverlagerung oder Stufenbildung. Dank der Konizität von .02 und der aussergewöhnlichen Flexibilität folgen die ScoutRace dem Kanalverlauf perfekt und werden ohne Druck bis AL verwendet. Danach kann die Kanalaufbereitung erfolgt mit den entsprechenden FKG-Instrumenten.

### Klinischer Fall mit extremer apikaler Krümmung

Mit freundlicher Genehmigung von Dr. Gilberto Debelian (Norway)



Pre-op Diagnosis: Pulpitis


Herausforderung: Doppelte Krümmung

Post-op Aufbereitung: 35/.04

### FKG Race: Spezifikation

Mehrere exklusive technologische Innovationen erklären die Effizienz - und den weltweiten Erfolg - des gesamten Race Programms:

- Exklusive perfekt runde Sicherheits- spitze: präzise Führung des Instrumentes
- Alternierende Schneidkante: eliminiert den Einschraub-Effekt
- Scharfe Schneidkante: optimale Schneideffizienz, Zeitersparnis
- Elektrochemische Politur: resistenter gegen Torsion und Materialermüdung
- SafetyMemoDisc (SMD): Kontrolle der Metallermüdung

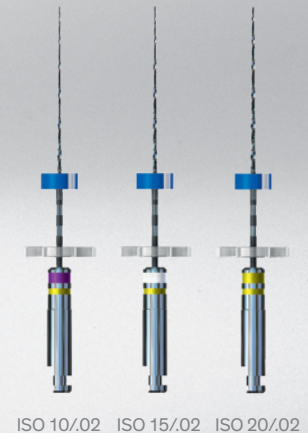

### Verfügbarkeit ScoutRace

<b>Individuelle Größen</b>	5 Stk/Schachtel
<b>Sortiment</b>	2 × 10/.02, 2 × 15/.02, 2 × 20/.02
<b>Längen</b>	21 mm, 25 mm, 31 mm



## FKG Dentaire SA

Das 1931 gegründete Schweizer Unternehmen FKG Dentaire hat im Jahr 1994 neuen Schwung bekommen, als Jean-Claude Rouiller die Leitung übernahm.

Er führte das Unternehmen an die Spitze für die Entwicklung, die Herstellung und den Vertrieb von Dentalprodukten für Zahnärzte, Endodontologen und zahntechnische Labors.

Die Strategie von FKG ist auf innovative Produkte, die höchste Präzision bieten, und die Entwicklung von Instrumenten für die Dentalwelt ausgerichtet, um Lösungen hervorzubringen, die anspruchsvollsten Anforderungen gerecht werden.

2011 übernahm Thierry, Sohn von Jean-Claude Rouiller, die Geschäftsführung von FKG. Unter seiner Leitung wurde das Vertriebsnetz stark ausgedehnt, so dass

die Instrumente von FKG heute in rund 100 Ländern weltweit erhältlich sind. Die Dynamik, die hervorragende Produktqualität und der Sinn für Innovation von FKG Dentaire wurden im Jahr 2012 vom Swiss Venture Club ausgezeichnet.

Seit 2013 verfügt FKG Dentaire auch über einen Reinraum, um seine Produktreihe an sterilen Produkten fertigen zu können.

In 2013 und 2014 wurden Ausbildungszentren mit modernsten Infrastrukturen in La Chaux-de-Fonds, Dubai and Oslo eröffnet.

Das Unternehmen ist gemäß internationalen Normen und gesetzlichen Vorschriften zertifiziert.



**FKG Dentaire SA**, Crêt-du-Loclle 4, CH-2304 La Chaux-de-Fonds, Switzerland  
T +41 32 924 22 44, [info@fkg.ch](mailto:info@fkg.ch), [www.fkg.ch](http://www.fkg.ch)